

# AED-3100 INSTRUCTIONS

● No response ● No breathing ● No pulse (Medical Staff Only)

## ① Open the lid, turn on power ! The voice prompts are in Japanese followed by English



Open the lid



Pull

There are "pip" sounds at 100 times/minute.

「成人モードです。意識・呼吸を確認してください。胸を裸にして、AEDのフタから四角い袋を取り出してください。袋を破いて、パッドを取り出してください。パッドを青いシートからはがして図のように右胸と左わき腹に貼ってください」

Adult mode. If patient has no response and is not breathing, remove all clothing from patient's chest.

Important

Check whether the patient is adult or child

When the patient is child (preschooler).  
⇒ "Child mode".



## ② Attach the electrode pads.



When you attach the electrode pads, AED automatically starts analyzing the heart rhythm.

「体にさわらないでください。心電図を調べています。体にさわらないでください。」

Do not touch patient. "Analyzing heart rhythm."

When a defibrillation shock is required

「電気ショックが必要です。充電しています。」

Shock advised.  
Charging.

When a defibrillation is not required

「電気ショックは必要ありません。体にさわっても大丈夫です。直ちに胸骨圧迫と人工呼吸を始めてください。」

No shock advised. "Start CPR"

## ③ Press the SHOCK button.



「体から離れてください。点滅ボタンをしっかりと押してください。」

Do not touch patient.  
Press flashing button.

「電気ショックを行いました。体に触っても大丈夫です。直ちに胸骨圧迫と人工呼吸を始めてください。」


If trained, able and willing, giving rescue breath.

Combine 30 compressions and rescue breath

Shock delivered.

If you see normal breathing, keep them in the side position and wait for ambulance.  
(keep the electrode pads on)



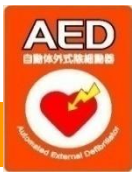

# AED-3100の使い方

●意識がない

●呼吸がない

●脈拍なし（医療従事者のみ）

## ① ふたを開けると、電源ON！ 音声ガイドは日本語 → 英語 の順番に流れます。



けを  
る開タ



PU PU PU



フタを開けると100回/分の動作音が始まります。



「成人モードです。意識・呼吸を確認してください。胸を裸にして、AEDのフタから四角い袋を取り出してください。袋を破いて、パッドを取り出してください。パッドを青いシートからはがして図のように右胸と左わき腹に貼ってください」

Adult mode. If patient has no response and is not reathing, remove all clothing from patient's chest."

重要

成人を救助する時⇒成人モード

小児（未就学児）を救助する時⇒小児モード



成人・小児モード  
切換スイッチ

## ②パッドを体に貼ります



パッドを貼ると、自動的に心電図の解析を開始します。AEDの音声ガイドに従ってください。



「体にさわらないでください。心電図を調べています。体にさわらないでください。」

"Do not touch patient." "Analyzing heart rhythm."

電気ショックが必要な心電図の場合



「電気ショックが必要です。充電しています。」

"Shock advised." "Charging."



電気ショックが不要ない心電図の場合

「電気ショックは必要ありません。体にさわっても大丈夫です。直ちに胸骨圧迫と人工呼吸を始めてください。」

"No shock advised." "Start CPR"

## ③ ショックボタンを押します



「体から離れてください。点滅ボタンをしっかりと押してください。」

"Do not touch patient." "Press flashing button."



「電気ショックを行いました。体に触っても大丈夫です。直ちに胸骨圧迫と人工呼吸を始めてください。」

"Shock deliverd. It is safe to touch patient. Start CPR"

人工呼吸の訓練を受けており、技術と意思があれば胸骨圧迫30回と人工呼吸2回を交互に2分間行います。



胸骨圧迫



30 : 2



人工呼吸

普段どおりの呼吸が戻った場合は、身体を横向きにして救急隊員の到着を待ちます。

（電極パッドは貼ったままにしてください。）



NIHON KOHDEN